

ООО «ПлатИНа»

**Инструкция
по сборке складной ванны-простыни**



г. Санкт-Петербург

Комплектация ванны-простыни:

1. Тканевая основа с присоединенным к ней шлангом.
2. Металлические штанги (пара), состоящие из трех частей.
3. П-образные стойки-держатели (пара).
4. Подголовник.
5. Сумка для переноски и хранения



Больного необходимо осторожно повернуть на бок и переместить его к краю постели (как поступают во время смены постельного белья).

Расстелить тканевую основу ванны-простыни на постели так, чтобы слив со шлангом находились в ее ножной части.

Повернуть больного на спину таким образом, чтобы он оказался по центру ванны-простыни.

Соединить части штанг и зафиксировать соединение с помощью механизма кнопочной фиксации.



Вставить поочередно собранные штанги в продольные отверстия, расположенные по длинному краю ванны-простыни.



Предварительно каждая штанга должна быть продета в плотные тканевые петли, пришитые с двух сторон короткого края ванны-простыни.



Установить металлические стойки-держатели в головной и ножной части постели. Для этого концы шланг нужно продеть в отверстия стоек.



Установить подголовник, закрепив его металлические части на штангах.



Уложить голову больного на подголовник.

Наполнить ванну водой любым удобным способом (ковш, таз, ведро и проч.)

Окончив купание, вынуть заглушку из шланга и слить воду в подставленную емкость.

Удалить остатки воды с помощью впитывающей салфетки.

Убрать стойки-держатели.

Вынуть металлические штанги.

Повернуть больного на бок и переместите к краю постели.

Вынуть из-под него тканевую основу.

Вытереть насухо тканевую основу ванны-простыни.

Металлические части ванны-простыни высушить и убрать для хранения.